



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/3-1/2014, EHK - 822

### Sérologie *Streptococcus pyogenes* – latexová metoda

Vzorky obsahují infekční séra. Je proto nezbytné zachovávat všechny zásady bezpečné laboratorní praxe. O této skutečnosti je nutno informovat všechny pracovníky, kteří se budou na jejich zpracování podílet.

V zájmu zachování anonymity hodnocení a prezentování výsledků neuvádějte při hlášení svou adresu ani jméno pracovníka, který vzorek zpracovával. Identifikačním údajem je pouze kódové číslo laboratoře.

Výsledky pošlete na přiloženém formuláři doporučeně poštou. Pokud nemohl být některý vzorek vyšetřen, uveďte v poznámce důvod.

Zásilka obsahuje 4 vzorky sér, určených ke stanovení titru ASO protilátky v množství  $> 210 \mu\text{l}$ .

**V tomto roce poprvé nezasílá NRL pro streptokokové nákazy standart o známém titru ASO.**

Uchovávejte v lednici při 2-8°C.

Prosím o kontakt s laboratořemi, které se do cyklu zařadili poprvé !!

Stabilita vzorku je zaručena přidávkem azidu sodného.

Vzorky připravila NRL pro streptokokové nákazy, Centra epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu, MUDr. Jana Kozáková, tel.267082260.

Bodování výsledků titrací:

Maximální počet bodů = 8

Počet bodů nutný pro splnění požadavků EHK = 6-8

2 body - titr ASO NRL/STR: +/-10% rozdíl titru

1 bod - titr ASO NRL/STR: +/-20% rozdíl titru

0 bodů – titr ASO NRL/STR: odlišný od výše uvedených rozdílů titrů

**Výsledky odešlete na adresu AP CEM nejpozději do 4. 3. 2014**

Žádáme naléhavě o dodržení termínu. V případě, že se rozhodnete z jakéhokoliv důvodu příslušné EHK nezúčastnit, sdělte to neprodleně AP CEM.

Ing. Ivan Peter, ved. pracoviště 2 ESPT (AP CEM)  
tel./fax 267 082 427  
email: apcem@szu.cz



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/3-1/2014, EHK - 822

**VÝSLEDKOVÝ PROTOKOL**  
**Sérologie *Streptococcus pyogenes* – latexová metoda**

<b>Kód laboratoře</b>	
-----------------------	--

Datum příjmu vzorků:

Číslo Vzorku	Kód vzorku *	Titř j/ml	NRL titř j/ml *	Body
<b>1</b>				
<b>2</b>				
<b>3</b>				
<b>4</b>				

\*)nevyplňujte

**Body celkem:**

Důležité upozornění :

1. Séra jsou konzervována azidem sodným
2. Prosíme, uveďte název a výrobce použité soupravy a metodu stanovení (stručně) - tyto informace slouží k analýze výsledků.
3. NRL/STR nezasílá standart o známém titru ASO.

Poznámky laboratoře:

Vypracoval (parařa):

Datum odeslání výsledků :

Komentář k hodnocení:

Hodnotitel: MUDr. Jana Kozáková

Podpis:

Dne: