



Státní zdravotní ústav
Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti
Poskytovatel zkoušení způsobilosti č. 7001 akreditovaný ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17043: 2010
Šrobárova 49/48, 100 00, Praha 10



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/25/2021, EHK 1201

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY - Sérologie *Yersinia enterocolitica*

Obsah zásilky

Vzorky mohou obsahovat patogenní a podmíněně patogenní mikroorganismy klasifikované jako Biologické činitele skupiny 2 (Sbírka zákonů č. 361/2007). V tomto případě je třeba s nimi zacházet jako s infekčním materiálem za dodržování všech doporučených bezpečnostních opatření. O této skutečnosti je nutno informovat všechny pracovníky, kteří se budou na jejich zpracování podílet. Při manipulaci s materiálem je tedy nezbytné zachovávat všechny zásady bezpečné laboratorní praxe pro práci s těmito činiteli, včetně správné likvidace zbylých vzorků. Zbytek vzorku po testování uschovejte pro potřeby případné reklamace, tj. dokud neobdržíte vyhodnocené výsledky.

Zásilka obsahuje 2 vzorky sér (a 250µl), určených ke zjištění protilátek proti *Yersinia enterocolitica*.

Manipulace se vzorky

1. Před vlastním použitím lahvičku vytemperujte na teplotu +15 až +25°C
2. Materiál jemně promíchejte tak, aby se předešlo tvorbě pěny a zpracujte jako běžné klinické vzorky.
3. Uzavřený kontrolní materiál uchovávejte při teplotě +2 až +8°C
4. Stabilita vzorků je během transportu zajištěna ošetřením konzervačním činidlem (azid sodný a merthiolát)

Hodnocení výsledků

S ohledem na možnosti a rozmanitost používaných metod jsou v rámci EHK hodnoceny pouze kvalitativní ukazatele celkové a dle jednotlivých izotypů imunoglobulinů (viz výsledkový protokol).

Hodnocení je prováděno na základě konsenzuálního výsledku. Maximální počet bodů - 6 (za každý správný požadovaný výsledek 1 bod). Při použití metody hodnotící vzorek pouze celkové Ig (blot apod., za správný výsledek 3 body, případně podmíněně správný- 1 bod).

Odeslání výsledků

Výsledky pošlete na přiloženém formuláři na adresu (viz záhlaví) poštou nebo e-mailem. Pokud nemohl být některý vzorek vyšetřen, uveďte v poznámce důvod. V zájmu zachování anonymity neuvádějte svou adresu ani jméno. Identifikačním údajem je pouze kódové číslo laboratoře.

Výsledky musí být odeslány nejpozději do 8. 6. 2021. Žádáme naléhavě o dodržení termínu.

Očekávané výsledky budou uveřejněny 10 dnů poté na internetových stránkách SZÚ na adrese:

<http://www.szu.cz/programy-kouseni-zpusobilosti-pro-mikrobiologicke-laboratore>. Zde naleznete také

tento průvodní dopis a další dokumenty k sérii. Všechny dokumenty je možno z výše uvedené adresy

stáhnout a vytisknout. Po vyhodnocení série bude na stejném místě uveřejněna závěrečná zpráva. Přílohu,

tj. ohodnocený výsledkový protokol, obdržíte jako dosud analogově s originální signaturou na Vaší kontaktní adresu.

Doplňující informace

Vzorky připravila RNDr. Marcela Drahošová, Ústav klinické imunologie a alergologie FN Hradec Králové, tel. 495 832 607.

V případě zjištění poškozených vzorků při rozbalení zásilky kontaktujte Koordinační pracoviště ESPT 2.

Pokud se rozhodnete této série neúčastnit nebo potřebujete změnit kontaktní údaje, sdělte to prosím

Koordinačnímu pracovišti ESPT 2. Zde Vám též zodpoví Vaše případné dotazy.

Datum: 18. 5. 2021

Koordinátor: MUDr. Barbora Macková

Koordinační pracoviště ESPT 2: +420 267 082 258, ehk@szu.cz



Státní zdravotní ústav
Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti
Poskytovatel zkoušení způsobilosti č. 7001 akreditovaný ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17043: 2010
Šrobárova 49/48, 100 00, Praha 10



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/25/2021, EHK 1201

VÝSLEDKOVÝ PROTOKOL Sérologie *Yersinia enterocolitica*

**KÓD
LABORATOŘE**

BODY

Datum příjmu vzorků:

Číslo vzorku	Vzorek 1			Vzorek 2		
Kód vzorku *)						
Kvalitativní hodnocení (celk. Ig, pozitivní, negativní nebo hraniční)						
Body						
izotyp	IgG	IgA	IgM	IgG	IgA	IgM
Kvalitativní hodnocení (P, N, HR **)						
Body						

*) nevyplňujte

**) uveďte vaše hodnocení v případě, kdy vyšetřujete přítomnost protilátek v izotypech imunoglobulinů (P, N, HR)

Prosíme, uveďte názvy použitých souprav, čísla šarží, expiraci. Tyto informace slouží k analýze výsledků z hlediska jednotlivých souprav.

Poznámky laboratoře:

Vypracoval (parafa):

Datum odeslání výsledků:

Komentář k hodnocení:

Hodnotitel: RNDr. Marcela Drahošová

Podpis: